


Simple Simon PT-INR, hurtigguide Prosedyre med pipette

Simple Simon[®] PT er et pasientnært, våtkjemisk laboratoriediagnostisk produkt for bestemmelse av protrombintid (PT) uttrykt i INR.



1 Trykk på knappen for å aktivere avleseren. Diverse informasjon kommer frem i displayet.

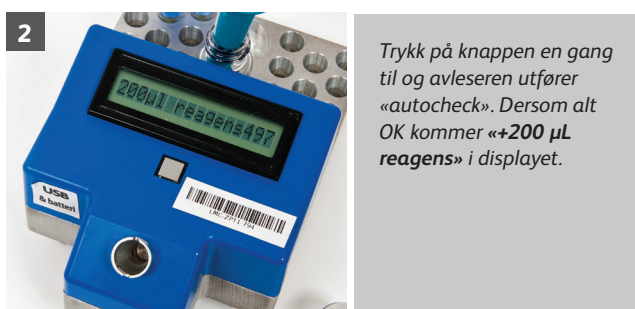

2 Trykk på knappen en gang til og avleseren utfører «autocheck». Dersom alt OK kommer «+200 µL reagens» i displayet.



3 Ta tak i et reaksjonsrør i plastkorken og flytt det direkte fra avleserens blokk til avleserens måleposisjon. Fest røret ved å vri til høyre for deretter å ta av den blå korken mens tidsnedtellingen fra 5 til 0 sekunder pågår.



4 Når avleser viser «10 µL prov & mix!» («& mix!» blinker!) er det klart for 10 mikroliter prøve, blod eller plasma.



5 Pipetter 10 µl prøve med den hvite medfølgende pipetten.



6 Tørk godt på utsiden av pipettespissen.



7a



Før ned pipettespissen med 10 µL prøve mot overflaten av reagenset i reaksjonsrøret i avleseren måleposisjon. Trykk ut prøven samtidig som spissen føres ned i reagenset. Skyll umiddelbart pipettespissen ved å trykke pipetten opp og ned ca. 3 ganger.

7b



Fortsett å blande ved å rotere/røre, pipettespissen i blandingen. Skyll deretter spissen igjen ca. 2 ganger ved å trykke pipetten opp og ned. Fortsett deretter å rotere spissen i blandingen til displayet viser «pipett ur». Tøm da pipettespissene og ta den ut av strålegangen.

8



Sett på lokket når avleser viser «Lock på». Displayet viser kontinuerlig aktuelle INR i realtid.

9



Når avleseren oppdager koagulasjonen signaliserer den «klott», og en verifikasjon begynner. Rør ikke reaksjonsrøret under pågående verifikasjon.

10



Når verifikasjonen er klar koagelkriteriet oppfylt vises «OK» og «kopp ur» vekselvis i displayet. Dersom det ikke er oppfylt vises «INR error».

11



Sett på den blå korken til reaksjonsrøret igjen og ta det ut av måleposisjonen. Vend reaksjonsrøret opp og ned samt inspekter innholdet. Det skal være koagulert dersom ikke avleser viser «INR>8». Motsatt indikerer feilaktighet.

12



Gjør alltid en rimelighetsvurdering av resultatet. For tips og informasjon om det se pakningsvedlegg. Om prøven er blod vises først Kap INR og ved å trykke på knappen vises Ven INR. Pass på å lese av riktig etter om det er tilsatt venøs eller kapillær prøve.

13



Ved å holde knappen nede i 2 sekunder stenges eller inaktiveres avleseren. En ny analyse kan nå begynne med start i punkt 1.

14



Analyser regelmessig den medfølgende kontrollen ZAP, eller annet kontrollmateriale. Dette for å forsikre at utstyret fungerer stabilt. Dokumenter resultatet av kontrollanalyseringer i skjemaet som finnes i esken med ZAP kontroller.