

Simple Simon PT-INR, hurtigguide

Montering og bruk av MixxoCap-kapillæret til prøvesamling

1



Sett fast en blå MixxoCap-hatt ved MixxoCap øvre åpning slik at den fester seg ved første nivå, hatten går da lett å rotere (kontroller!) og kanalen under hatten er åpen slik at kapillæret kan fylles. Setter man hatten feilaktig i andre nivå er kanalen stengt og kapillæret går ikke å fylle.

2



Kapillærprøve: Pass på at pasienten har varme fingre. Bruk lansett egnet for INR-prøve.

3



Tørk vekk første dråpe og få frem en god dråpe.

4




Fyll MixxoCap-kapillæret korrekt ved å holde kapillæret i vinkel inn i dråpen. Pass på at munningen ikke blir blokkert.

Man skal **ikke** skråstille kapillæret mer enn horisontalt.

OBS! Om kapillærets vinkel er mer enn 90 grader og forbi ett horisontalplan, kan MixxoCap bli feilaktig overfylt. Ikke forbi vannrett stilling og nedover. Det finnes da en risiko for å fylle for mye ved at prøvemateriale renner videre forbi kapillærets ende og begynne å fylle i MixxoCap-kroppen. Prøvevolumet blir da for stort og med en feilaktig for lav INR-verdi.



5



Venøsprøve: Ved oppsugning av blod holdes røret forsiktig i vinkel.

6



Tørk av nedre del av plastkapillæret med et absorberende papir for å fjerne rester av prøvematerialet på utsiden. Vær forsiktig med selve munningen slik at papiret ikke suger opp prøve fra innsiden av kapillæret.