


## Simple Simon PT-INR, hurtigguide Prosedyre med MixxoCap

Simple Simon<sup>®</sup> PT er et pasientnært, våtkjemisk laboratoriediagnostisk produkt for bestemmelse av protrombintid (PT) uttrykt i INR.



Trykk på knappen for å aktivere avleseren. Diverse informasjon kommer frem i displayet.

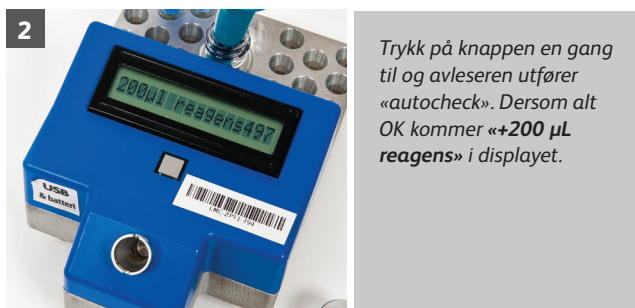

Trykk på knappen en gang til og avleseren utfører «autocheck». Dersom alt OK kommer «+200 µL reagens» i displayet.



Ta tak i et reaksjonsrør i plastkorken og flytt det direkte fra avleserens blokk til avleserens måleposisjon. Fest røret ved å vri til høyre for deretter å ta av den blå korken mens tidsnedtellingen fra 5 til 0 sekunder pågår.



Når avleser viser «10 µL prov & mix!» («& mix!» blinker!) er det klart for 10 mikroliter prøve, blod eller plasma.



Gjør klar en MixxoCap: sett fast en blå mixxohatt ved MixxoCap<sup>®</sup> øvre åpning slik at den fester seg ved «mixxokroppens» første nivå.



Fyll MixxoCap helt med 10 µL prøve, enten fra fingerstikk eller venøs prøve.

Ved fingerstikk tørk av første dråpe for deretter å fylle kapillæret.



7

Tørk av på utsiden av  
plastkapillæret!



8

Før ned plastkapillæret mot  
reagensets bunn og tilsett  
prøven samtidig ved å trykke  
Mixxocap hatten ned i sitt  
andre nivå. Skyll deretter  
umiddelbart ved å trykke  
rolig ca. 6 ganger på hatten  
opp og ned.



Så lenge det står «Mix!» i  
displayet fortsett å trykke  
den blå hatten på Mixxo-  
cap opp og ned uten å  
slippe taket på hatten.  
Når det står «pipette ut»  
tas umiddelbart Mixxocap  
ut samtidig som hatten  
trykkes ned.



9

Sett på lokket når avleser  
viser «Lock på». Displayet  
viser kontinuerlig aktuelle  
INR i realtid.



10

Når avleseren oppdager  
koagulasjonen signali-  
serer den «kloTT», og en  
verifikasjon begynner. Rør  
ikke reaksjonsrøret under  
pågående verifikasjon.



11

Når verifikasjonen er klar  
koagelkriteriet oppfylt  
vises Klot «OK» og «kopp  
ur» vekselvis i displayet.  
Dersom det ikke er oppfylt  
vises «INR error».



12

Sett på den blå korken til  
reaksjonsrøret igjen og ta  
det ut av måleposisjonen.  
Vend reaksjonsrøret opp  
og ned samt inspekter  
innholdet. Det skal være  
koagulert dersom ikke  
avleser viser «INR>8».  
Motsatt indikerer feil-  
aktighet.



13

Gjør alltid en rimelighets-  
vurdering av resultatet.  
For tips og informasjon  
om det se paknings-vedlegg.  
Om prøven er blod vises først  
Kap INR og ved å trykke på  
knappen vises Ven INR.  
Pass på å lese av riktig etter  
som det er tilsatt venøs eller  
kapillær prøve.



14

Ved å holde knappen nede  
i 2 sekunder stenges eller  
inaktiveres avleseren. En  
ny analyse kan nå begynne  
med start i punkt 1.



15

Analyser regelmessig den  
medfølgende kontrollen ZAP,  
eller annet kontrollmateriale.  
Dette for å forsikre at utstyret  
fungerer stabilt. Dokumenter  
resultatet av kontrollanalyse-  
ringer i skjemaet som finnes  
i esken med ZAP kontroller.